


MASAŻER

LAKTACYJNY

Instrukcja obsługi

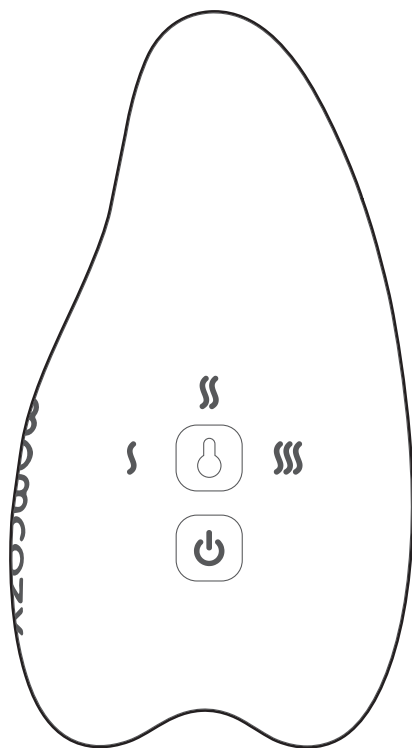

momcozy

OSTRZEŻENIE

- NIE POZWALAJ NIKOMU NIEZAZNAJOMIONEMU Z TYM PRODUKTEM NA JEGO UŻYWANIE.
- TRZYMAJ POZA ZASIĘGIEM DZIECI.
- TO NIE JEST ZABAWKA.
- NIE USZKADZAJ PRZEWODU ANI WTYCZKI ANI NIE UŻYWAJ, GDY PRZEWÓD LUB WTYCZKA JEST USZKODZONA I/LUB WPI-
NANIE DO ŹRÓDŁA ZASILANIA JEST LUŻNE. NIEPRZESTRZEGA-
NIE TEJ OSTROŻNOŚCI MOŻE SKUTKOWAĆ PORAZENIEM
ELEKTRYCZNYM, SPIĘCIEM OBWODU LUB POŻAREM.
- NIE UŻYWAJ TEGO URZĄDZENIA DO ŻADNEGO INNEGO CELU,
NIŻ OPISANY W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI LUB OPAKOWANIU.
- NIE PRZEŁADUJ ŹRÓDŁA ZASILANIA.
- NIE UŻYWAJ, JEŚLI URZĄDZENIE JEST USZKODZONE.
- UŻYWAJ TYLKO KABLA USB, KTÓRY DOSTARCZONY
Z URZĄDZENIEM.
- ZAWSZE WKŁADAJ WTYCZKĘ DO ŹRÓDŁA ZASILANIA
NALEŻYCIEM.
- UPRAWNIJ, ŻE MASAŻER JEST SUCHY PRZED ŁADOWANIEM.
- TRZYMAJ Z DALA OD WODY PODCZAS ŁADOWANIA.
- REGULARNIE CZYŚĆ WTYCZKĘ, ABY NIE POWSTAŁA NA
NIEJ KURZ LUB OSAD.
- ODŁĄCZ PRZEWÓD OD ŹRÓDŁA ZASILANIA PRZED
CZYSZCZENIEM.
- NIE DOTYKAJ WTYCZKI MOKRYMI RĘKAMI.

- NIE ZANURZAJ CAŁKOWICIE URZĄDZENIA W WODZIE.
- JEŚLI UŻYWASZ JAKICHKOLWIEK AKTYWNYCH URZĄDZEŃ IM-PLANTOWANYCH, NA KTÓRE MOGĄ MIEĆ WPŁYW POLA MAGNETYCZNE (TAKIE JAK ROZSZERZACZ SERCA I IMPLANTOWALNY DEFIBRYLATOR KARDIOWERSERUJĄCY), ZALECA SIĘ SKONSULTOWANIE SIĘ Z LEKARZEM PRZED UŻYCIEM MASAŻERA MOMCOZY.
- NIE GOTUJ I NIE PODGRZEWAJ MASAŻERA.
- NIE DZIEL SIĘ TYM OSOBISTYM PRZEDMIOTEM Z INNYMI Z POWODU KONIECZNOŚCI ZACHOWANIA HIGIENY.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- TEN SPRZĘT MOŻE BYĆ UŻYWANY PRZEZ OSOBY Z OGRANICZONYMI ZDOLNOŚCIAMI FIZYCZNYMI, SENSORYCZNYMI LUB UMYSŁOWYMI LUB OSOBY NIEPOSIADAJĄCE DOŚWIADCZENIA I WIEDZY, JEŻELI OTRZYMAŁY ONE NADZÓR LUB INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA SPRZĘTU I ROZUMIEJĄ ZWIĄZANE Z TYM ZAGROŻENIA;
- DZIECI NIE POWINNY BAWIĆ SIĘ TYM SPRZĘTEM;
- CZYSZCZENIE I KONSERWACJA POWINNY BYĆ WYKONYWANE POD NADZOREM DOROSŁYCH;
- WYMIANĘ AKUMULATORA NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA;
- WRZUCENIE AKUMULATORA DO OGNIĄ LUB GORĄCEGO PIECA ALBO MECHANICZNE ZGNIECENIE LUB PRZECIĘCIE MOŻE SPOWODOWAĆ WYBUCH;

- POZOSTAWIANIE AKUMULATORA W BARDZO WYSOKIEJ TEMPERATURZE OTOCZENIA MOŻE SPRAWIĆ, ŻE NASTĄPI EKSPLOZJA LUB WYCIEK PALNEJ CIECZI LUB GAZU;
- AKUMULATOR PODDANY BARDZO NISKIEMU CIŚNIENIU POWIERZCHNIOWEMU, CO MOŻE SPRAWIĆ, ŻE NASTĄPI EKSPLOZJA LUB WYCIEK PALNEJ CIECZI LUB GAZU.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Oświadczenie o zgodności z przepisami UE: Hong Kong Lute Technology Co., Limited

Niniejszym oświadczam, że urządzenie to jest zgodne z wymaganiami podstawowymi i innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/30/UE

UTYLIZACJA



Na końcu cyklu życia produktu, nie wyrzucaj tego produktu do zwykłego domowego śmieci, ale dostarcz go do punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektonicznego i baterii. Elektryczne i Elektroniczne Odpady mogą mieć potencjalnie szkodliwe skutki dla środowiska. Niewłaściwe usuwanie może prowadzić do gromadzenia się szkodliwych toksyn w powietrzu, wodzie i glebie, co jest szkodliwe dla zdrowia człowieka. Masz obowiązek poprawnego usuwania urządzenia. Skonsultuj się z władzami miejskimi w celu uzyskania informacji na temat usuwania.

PRZEGLĄD PRODUKTU


Karmienie piersią może być trudnym wyzwaniem dla matek karmiących, dlatego stworzyliśmy masażer do laktacji momcozy, aby zapewnić Ci najbardziej komfortowe doświadczenie. Masażer piersi pomaga złagodzić ból i dyskomfort związany z karmieniem piersią, zatkane przewody mleczne, przekrwienie i zapalenie piersi. Ponadto, przyspiesza wypływ mleka i skutecznie opróżnia piersi.

CECHA PRODUKTU

- **WIELE TRYBÓW I USTAWIEŃ INTENSYWNOŚCI:** Wyposażony w wiele trybów wibracji i ustawień intensywności, masażer do laktacji momcozy pomaga matkom karmiącym złagodzić bolesne zatkanie przewodów mlecznych. Dodatkowo, nasz masażer skutecznie redukuje dyskomfort związany z przekrwieniem.
- **Regulowane poziomy podgrzewania:** Złagodzić zatkane przewody mleczne i zapalenie piersi, pobudzać wypływ mleka podczas karmienia piersią.
- **MAGNETYCZNE ŁADOWANIE USB:** Magnetyczny design ładowania umożliwia szybsze i prostsze ładowanie.

W zestawie znajduje się torba na ramię na wyjazd.

- **ZAPROJEKTOWANY DLA KOMFORTU:** Nasz masażer do piersi został zaprojektowany z myślą o komforcie, dlatego nie dziwi, że nasz masażer jest polecany przez konsultantów laktacyjnych do łagodzenia problemów związanych z karmieniem piersią.
- **Wodoodporny IPX7:** Nasz wodoodporny design pozwala na korzystanie pod prysznicem, dając mamom karmiącym wolność korzystania z naszego produktu, kiedy tylko jest to potrzebne.
- **Płynny przepływ mleka:** Masażer do piersi Momcozy skutecznie przygotowuje i stymuluje pierś do karmienia, dzięki czemu możesz osiągnąć skuteczny wpływ mleka.
- **Szybsze uwolnienie mleka:** Delikatne użycie naszego masażera **do** piersi może pomóc wzmocnić odruch uwolnienia mleka, poprzez stymulację nerwów **w** piersi **i** brodawce.
- **Masaż docelowy:** Wielopunktowy kontakt dla celowanego leczenia.

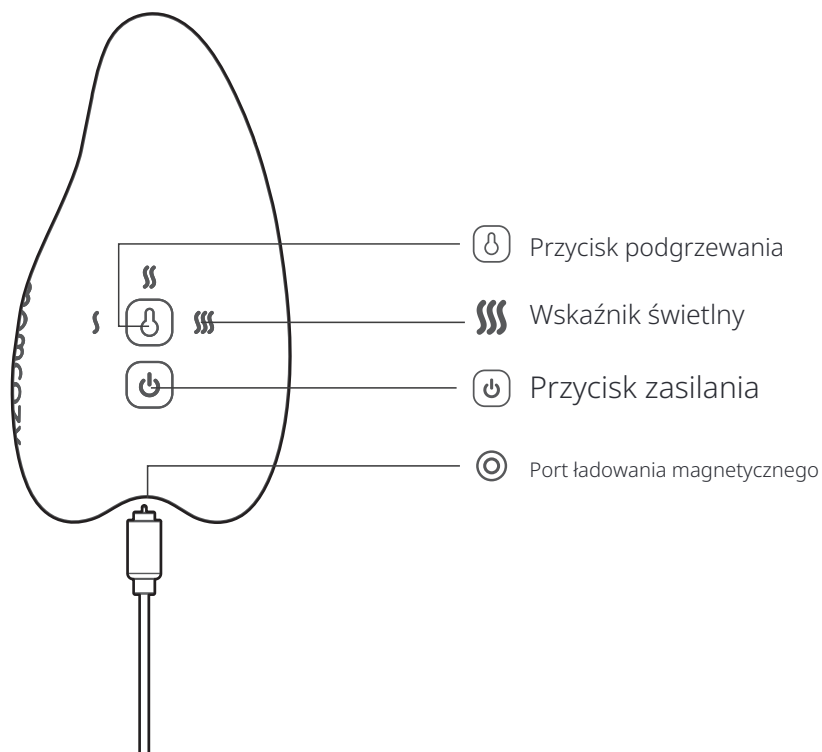

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

 **Nie używaj podczas ładowania**

Przycisk zasilania:

1. Włącz masażer, przytrzymując przycisk zasilania „” przez 2 sekundy.
2. Naciśnij krótko przycisk zasilania „”, aby zmienić intensywność wibracji i tryby wibracji.

3. Wyłącz masażer, przytrzymując przycisk zasilania „” przez 2 sekundy.

Przycisk podgrzewania

1. Włącz tryb podgrzewania „”, przytrzymując przycisk podgrzewania przez 2 sekundy. Tryb podgrzewania automatycznie wyłączy się po 30 minutach.
2. Naciśnij krótko przycisk podgrzewania „”, aby przełączać się między 3 ustawieniami temperatury.
3. Wyłącz tryb podgrzewania „”, przytrzymując przycisk podgrzewania przez 2 sekundy.


Ładowanie magnetyczne

1. Obsługa jedną ręką i mocne przyciąganie magnetyczne.
2. Podłącz USB do komputera lub adaptera USB.
3. Wskaźnik świetlny powoli miga na biało podczas ładowania masażera.
4. Masażer jest w pełni naładowany, gdy światło białe pozostaje stałe.
5. Naładowanie urządzenia w pełni zajmuje około 3 godzin. Naładuj masażer według potrzeb.

SPOSOBY UŻYCIA




Użyj podgrzewacza i masuj pierś w kierunku brodawki.

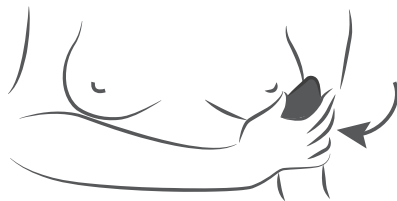


Użyj podgrzewacza i masuj pierś w kierunku brodawki.



Delikatnie masuj pierś używając wąskiej części masażera.

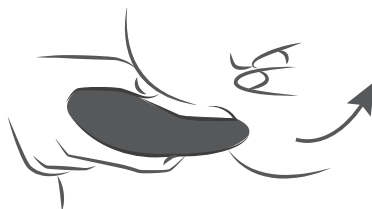

Użyj wąskiego końca masażera i delikatnie naciskaj na zablokowane przewody mleczne.

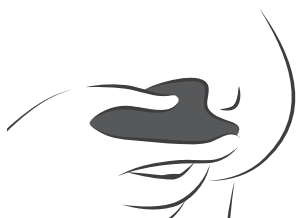


Delikatnie masuj pierś za pomocą zakrzywionego brzegu.




Umieść masażer na różnych częściach piersi, aby stymulować odpływ mleka i zwiększyć przepływ mleka.


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

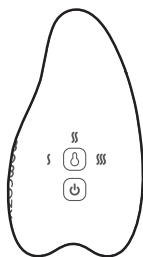

Masażer
do laktacji

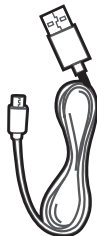

Kabel ładowania ma-
gnetycznego USB

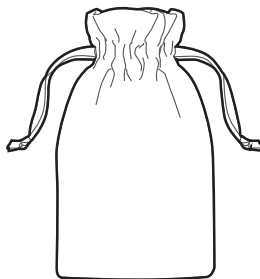

Przenośna torba na
przechowywanie

SPECYFIKACJE

Model: A1

Czas użytkowania: 1.5 godziny (czas pracy może się różnić w zależności od różnych ustawień temperatury i wibracji podczas użytkowania.)

Wymiary: 115mm X 61.5mm X 27.5mm

Tryb wibracji: 6

Pojemność akumulatora: 800 mAh

Rodzaj akumulatora: Akumulator litowo-polimerowy o możliwości ponownego ładowania

Wejście: DC 5V 1A

Czas ładowania: Ok. 3 godziny

Wodoodporność: IPX7

Poziomy temperatury:

Niska temp.: 39 °C / 102.2 °F

Średnia temp.: 42 °C / 107.6 °F

Wysoka temp.: 45 °C / 113 °F



Prolinx Global LTD
27 Old Gloucester Street Londyn, WC1N 3AX, UK



Producent: Hong Kong Lute Technology Co., Limited
Adres: Pokój 02, 21/F, Hip Kwan Commercial Building, 38
Pitt Street, Yau Ma Tei, Kowloon, Hongkong

Email: support@momcozy.com



Prolinx GmbH
Brehmstr. 56, 40239 Duesseldorf Niemcy



Producent: Hong Kong Lute Technology Co., Limited
Adres: Pokój 02, 21/F, Hip Kwan Commercial Building, 38
Pitt Street, Yau Ma Tei, Kowloon, Hongkong

Email: support@momcozy.com

Importer z USA:

Firma: PACIFIC FORTUNE MANAGEMENT INC

Adres: 145 E Duarte RD Suite AA 198 Arcadia CA 91006

WYPRODUKOWANO W CHINACH. / WYPRODUKOWANO W CHINACH.
NACH. HECHO EN CHINA. / HERGESTELLT IN CHINA.
GEMAAKT IN CHINA. / FABBRICATO IN CINA.



MEHRWEG



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl



Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.