

momcozy

Laktator

Mobile Style™

Numer modelu : BP311

Instrukcja Obsługi

(Do użytku OTC)



Dokładnie przeczytaj ten podręcznik użytkownika przed użyciem tego urządzenia i zachowaj ten podręcznik do przyszłego odniesienia.

SPIS TREŚCI

- 1. Wprowadzenie do produktu**
- 2. Instrukcje ostrzegawcze i środki ostrożności**
- 3. Wskazania do użycia / Przeznaczenie**
- 4. Przeciwwskazania**
- 5. Informacje o bezpieczeństwie**
- 6. Opis produktu**
- 7. Instrukcje obsługi**
- 8. Transfer**
- 9. Warunki przechowywania**
- 10. Specyfikacja**
- 11. Konserwacja i części zamienne**
- 12. Deklaracja zgodności**
- 13. Rozwiązywanie problemów**
- 14. Utylizacja**
- 15. Gwarancja**
- 16. Informacje EMC**
- 17. Oświadczenie dotyczące podróży lub użytkowania międzynarodowego**
- 18. Informacje o producencie**
- 19. Oświadczenie o zgodności FCC**
- 20. Zgłaszanie niepożądanych zdarzeń**

1. Wprowadzenie do produktu

Laktator Momczy jest przeznaczona do używania przez kobiety karmiące w celu wyrażania i zbierania mleka z ich piersi. Noszona pompka do piersi Momczy tworzy podciśnienie wokół sutka, aby wyrazić mleko matki. Mleko jest zbierane w zbieraczu mleka.



Urządzenie zawiera tryb stymulacji, tryb wyrażania i tryb mieszany. W trybie stymulacji, pompka do piersi zaczyna od szybkiego i krótkiego wzoru ssania, aby pobudzić przepływ mleka. W trybie wyrażania, pompka do piersi zaczyna od wolnego wzoru ssania w celu wyrażania mleka, ssąc głębiej i wolniej. W trybie mieszanym, pompka do piersi zaczyna od szybkiego i krótkiego wzoru ssania, a następnie przechodzi do wolnego i długiego wzoru ssania. Aby zapobiec przedostawaniu się mleka do systemu podciśnienia.

Zestawy do zbierania mleka zawierają silikonową membranę, która fizycznie oddziela drogę kontaktu z mlekiem od systemu podciśnienia.















Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego.

2. Instrukcje ostrzegawcze i Środki ostrożności

Znaki ostrzegawcze i symbole graficzne w instrukcji mają na celu umożliwienie bezpiecznego i prawidłowego korzystania z produktu oraz zapobieganie szkodom dla Ciebie i innych. Znaki ostrzegawcze i symbole graficzne opisane są w następujący sposób:

Symbole ostrzegawcze / środki ostrożności	
 Ostrzeżenie	Ostrzeżenie informuje czytelnika o sytuacji, która, jeśli nie zostanie uniknięta, może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń. Może również opisywać potencjalnie poważne reakcje niepożądane i zagrożenia dla bezpieczeństwa.
 Środki ostrożności	Wskazanie alertu zagrożenia, które ostrzega czytelnika o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która, jeśli nie zostanie uniknięta, może prowadzić do drobnych lub umiarkowanych obrażeń użytkownika lub pacjenta lub uszkodzenia sprzętu lub innej własności. Może być również używana do ostrzeżenia przed niebezpiecznymi praktykami. To obejmuje szczególną opiekę niezbędną do bezpiecznego i efektywnego użycia urządzenia oraz opiekę niezbędną do uniknięcia uszkodzenia urządzenia, które może wystąpić w wyniku użycia lub niewłaściwego użycia.
Przeciwwskazania	Przeciwwskazania to warunki, w których urządzenie nie powinno być używane, ponieważ ryzyko użycia wyraźnie przewyższa jakiegokolwiek możliwe korzyści. Mogą być osoby, dla których urządzenie nie powinno być używane z powodu ich stanu zdrowia.
Uwagi	Wskazuje na potrzebę uwagi, jeśli brak uwagi może prowadzić do niewłaściwego użycia produktu lub uszkodzenia urządzenia.

Opis symbolu

	Chronić przed wilgocią		Limit stosu 5 warstw
	Część stosowana typu BF		Odwołać się do instrukcji Obsługi.
	Kod partii		Data produkcji
	Informacje producenta : Nazwa producenta i adres		Numer seryjny
	Opakowania dystrybucyjne nie powinny być narażone a działanie światła słonecznego		Do kontaktu z żywnością
IP22	Pierwsza liczba 2 : Ochrona przed stałymi ciałami obcymi o średnicy 12,5 mm i większej. Druga liczba 2 : Ochrona przed pionowo opadającymi kroplami wody, gdy obudowa jest skierowana do góry pod kątem do 15 °.		
	Utylizacja zgodnie z Dyrektywą 2012 / 19 / UE (WEEE)		
	Urządzenie nie zostało przetestowane do użytku w środowisku MR i nie powinno być używane w narażeniu na środowiska MR, gdy pacjenci noszą urządzenie. Trzymaj z dala od pokoju skanera MRI.		
	FCC		CE

3. Wskazania do użycia / Przeznaczenie użytkownika

[Wskazania do użycia / Przeznaczenie użytkownika]

Laktator Momcozy (model : BP311) jest przeznaczona do odciągania mleka od kobiet karmiących w celu zbierania mleka z ich piersi. Urządzenie jest przeznaczone dla jednego użytkownika.

[Użytkownicy docelowi]

Mogą czytać i rozumieć podręcznik użytkownika

PACJENT jest zamierzonym OPERATOREM

[Populacja pacjentów]

Karmiące kobiety

[Środowisko użytkowania]

Środowisko opieki zdrowotnej w domu

4. Przeciwwskazania

Nie używaj tego laktatora, jeśli masz aktywne wszczepione urządzenie, które może być wpływane przez pole magnetyczne (np. rozrusznik serca; wszczepialny kardiowerter - defibrylator).

5. Informacje o bezpieczeństwie

Podczas korzystania z produktów elektrycznych, szczególnie gdy w pobliżu są dzieci, należy zawsze przestrzegać podstawowych informacji o bezpieczeństwie.

5.1 Ostrzeżenie

- 1) Nie używaj tego urządzenia, jeśli masz rozrusznik serca, wszczepiony defibrylator lub inne wszczepione metalowe lub elektroniczne urządzenie. Takie użycie może spowodować zakłócenia elektryczne lub śmierć.
- 2) Ta pompka do piersi nie jest przeznaczona do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, ani przez osoby bez doświadczenia i wiedzy. Takie osoby mogą korzystać z tej pompki do piersi tylko pod nadzorem lub po otrzymaniu odpowiednich instrukcji dotyczących korzystania z urządzenia od osoby odpowiedzialnej za swoje bezpieczeństwo.
- 3) Niebezpieczeństwo : Aby zredukować ryzyko porażenia prądem :
 - Zawsze odłączaj urządzenia elektryczne natychmiast po naładowaniu .
 - Nie używaj podczas kąpieli , prysznicu , prowadzenia pojazdu lub pływania .
 - Nie sięgaj po urządzenie elektryczne, które wpadło do wody , proszę natychmiast odłączyć adapter zasilania od gniazdka .
- 4) Noszona pompka do piersi Momcozy jest przedmiotem osobistej pielęgnacji i z powodów higienicznych nigdy nie powinna być dzielona między matkami ani odsprzedawana z jednej matki na drugą. Każda z tych czynności unieważni gwarancję .
- 5) Jeśli jesteś matką zakażoną wirusem zapalenia wątroby typu B, wirusem zapalenia wątroby typu C lub wirusem ludzkiego niedoboru odporności (HIV), odciąganie mleka matki za pomocą noszonej pompki do piersi Momcozy nie zmniejszy ani nie usunie ryzyka przeniesienia wirusa na twoje dziecko przez mleko matki.

- 6) Należy zachować szczególną ostrożność, gdy produkt jest używany w pobliżu dzieci lub osób niepełnosprawnych. Nie pozwól dzieciom ani zwierzętom bawić się jednostką silnikową, materiałami opakowaniowymi ani akcesoriami.
- 7) Używaj produktu tylko do zamierzonego użytku, jak opisano w niniejszej instrukcji.
- 8) Nie używaj akcesoriów ani innych komponentów do zbierania mleka, które nie są zalecane przez producenta.
- 9) Sprawdź adapter zasilania przed ładowaniem, nigdy nie używaj uszkodzonego adaptera zasilania.
- 10) Nigdy nie zostawiaj produktu bez nadzoru podczas ładowania.
- 11) Trzymaj produkt i wszystkie akcesoria z dala od gorących powierzchni.
- 12) Nigdy nie używaj go podczas snu lub senności.
- 13) Nie obsługuj w miejscach, gdzie używane są aerozole lub podawany jest tlen.
- 14) Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów wybuchowych lub łatwopalnych, w środowisku MRI, w komorze hiperbarycznej ani w pobliżu kominka lub grzejnika promiennikowego.
- 15) Unikaj uduszenia spowodowanego kablem ładującym.
- 16) Użytkownicy nie mają prawa naprawiać produktu. Jeśli to zrobisz, twoja gwarancja staje się nieważna. W przypadku napraw, wyślij do producenta lub wyznaczonego dystrybutora franczyzowego.
- 17) Zawsze wyłączaj pompkę do piersi przed usunięciem korpusu pompki z piersi, aby uwolnić podciśnienie.
- 18) Zasilane pompki do piersi, które są przeznaczone dla pojedynczych użytkowników, nigdy nie powinny być wypożyczane ani dzielone.
- 19) Nigdy nie używaj pompki do piersi, gdy jesteś w ciąży, ponieważ odciąganie może wywołać poród.
- 20) Wysoka temperatura zastosowanej części może osiągnąć maks. 43,9 °C, nadmierna temperatura może spowodować oparzenia skóry, upewnij się, że skóra piersi jest nienaruszona i zdrowa przed użyciem. Jeśli poczujesz przegrzanie, proszę wyłączyć urządzenie. W celu uniknięcia. Oparzenia niskotemperaturowego, maksymalny czas ciągłego użytkowania nie powinien przekraczać 30 minut za każdym razem, a przerwa między dwoma użyciami powinna wynosić co najmniej 5 minut, aby umożliwić schłodzenie urządzenia.
- 21) Czas użytkowania produktu (tj. czas pracy)
Urządzenie nie ma daty ważności, czas użytkowania produktu wynosi 500 godzin. Oczekiwana żywotność części nadających się do mycia wynosi od jednego do trzech miesięcy. Proszę sprawdzić, czy produkt działa prawidłowo przed użyciem. Używanie po upływie okresu eksploatacji może prowadzić do degradacji wydajności produktu. Na przykład, produkt nie może prawidłowo kontrolować podciśnienia, nadmierne podciśnienie może spowodować obrażenia.
- 22) Trzymaj produkt z dala od dzieci i zwierząt domowych oraz unikaj połknięcia małych części.


5.2 Środki ostrożności

- Nie umieszczaj ani nie przechowuj produktu w miejscu, gdzie może spaść lub zostać wciągnięty do wanny, zlewu lub basenu.
- Nie umieszczaj ani nie wrzucaj produktu do wody ani innej cieczy.
- Nie zanurzaj w żadnej cieczy z jakiegokolwiek powodu ani nie narażaj jednostki na ekstremalne wstrząsy, takie jak upuszczenie pompki.
- Nie kontynuuj odciągania przez więcej niż pięć minut, jeśli nie udało się uzyskać żadnego mleka. Spróbuj odciągnąć w innym czasie w ciągu dnia.
- Jeśli odczuwasz dyskomfort, można przerwać ssanie, wkładając palec między pierś a flanszę.
- Jeśli wystąpi podrażnienie lub dyskomfort, zaprzestań używania i skonsultuj się z lekarzem.
- Jeśli obudowa lub przewody adaptera zasilania stają się luźne, oddzielone lub przetarte, natychmiast zaprzestań używania adaptera zasilania i skontaktuj się z producentem urządzenia. Natychmiast zaprzestań używania urządzenia, jeśli zauważysz jakiegokolwiek dymienie lub palenie z jednostki pompy lub adaptera zasilania.
Oświadczenie: Jeśli poczujesz nadmierne ciepło z noszonej pompki do piersi podczas odciągania, natychmiast zaprzestań odciągania i usuń pompkę.

Uwagi: Unikaj bezpośredniego światła słonecznego na jednostce głównej.

6. Opis produktu

Produkt składa się głównie z jednostki głównej i zestawu do zbierania mleka itd.

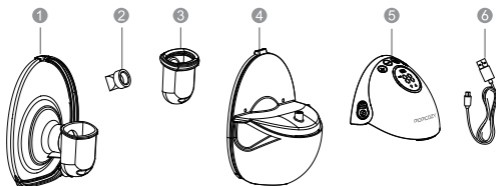

Rys. 1 opis jednostki

Opis jednostki pompki do piersi		
NR.	Element	Opis
1	Flansa 24mm	Wszystkie te komponenty składają się a zestaw do zbierania mleka
2	Zawór	
3	Membrana	
4	Zbieracz mleka (180ml)	
5	Jednostka główna	Silnik pompki
6	kabel USB typu C	Koniec wejściowy to interfejs USB 2.0, koniec wyjściowy to interfejs typu C

Inne dołączone akcesoria:

wkładka do flanszy 17 mm

wkładka do flanszy 19 mm

wkładka do flanszy 21 mm


Przewodnik szybkiego uruchamiania

Pokrywa flanszy

Linijka do pomiaru flanszy

Torba do przechowywania

Podręcznik użytkownika

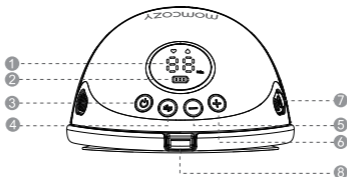




Rys. 2 panel sterowania

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1 Czas pracy / Poziom ssania | 2 Wyświetlacz baterii |
| 3 Włącz / Wyłącz / Pauza | 4 Wybór trybu |
| 5 Zmniejsz | 6 Zwiększ |
| 7 Port ładowania | 8 Wylot mleka |

Opis panelu sterowania

Nr.	Przyciski i diod LED	Funkcje
1		Długie naciśnięcie i przytrzymanie, aby włączyć / wyłączyć ; Krótkie naciśnięcie, aby wstrzymać, następnie naciśnij dowolny przycisk, aby kontynuować sesję odciągania.
2		Wybór trybu
3		Zmniejsz siłę ssania
4		Zwiększ siłę ssania
5		Tryb stymulacji: W tym trybie pompka do piersi zaczyna od szybkiego i krótkiego wzoru ssania, aby pobudzić przepływ mleka.
6		Tryb wyrażania: Pompka do piersi zaczyna od wolnego wzoru ssania do wyrażania mleka, ssąc głębiej i wolniej.
7		Tryb mieszany: W tym trybie pompka do piersi zaczyna od szybkiego i krótkiego wzoru ssania następnie przechodzi do wolnego i długiego wzoru ssania.
8		Wyświetlacz poziomu ssania: Pompka do piersi ma 9 poziomów ssania do wyboru. Wyświetlacz czasu pracy: Czas ekstrakcji mleka. wyświetlacz w zakresie 00-29 minut (sekundy wyświetlane, jeśli krócej niż 1 minuta)
9		Wyświetlacz baterii

Wskaźnik poziomu baterii		
Niska bateria: Miga	W trakcie ładowania: Świeci jeden po drugim	W pełni naładowana: Świeci na stałe
		

Po wyczerpaniu baterii urządzenie automatycznie się wyłącza, nie może być ponownie używane i może tylko wyświetlać status niskiej baterii.


7. Instrukcje obsługi

7.1 Ładowanie baterii

Proszę naładować produkt przed pierwszym użyciem. Laktator jest zasilany wewnętrzną, akumulatorową baterią litową.

Nasze produkty są pakowane z kablem ładującym (USB2.0 / linia Type-C), ale nie zawierają adaptera zasilania. Proszę samodzielnie zakupić adapter zasilania przed ładowaniem. Upewnij się, że kupujesz adapter zasilania, który pasuje do interfejsu USB 2.0, a także upewnij się, że moc wejściowa adaptera zasilania wynosi AC 100 ~ 240V 50/60 Hz, a moc wyjściowa to DC 5V 1A.


- Gdy pierwsza dioda wskaźnika baterii miga, oznacza to, że bateria jest niska i pozostało 30 minut czasu użytkowania. Proszę naładować device na czas.
- Po pełnym naładowaniu może być używana przez 5-6 sesji (około 180 minut) odciążania, 30 minut na sesję.

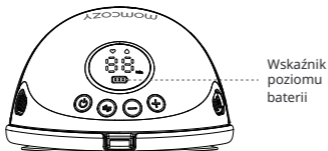

Rys. 3



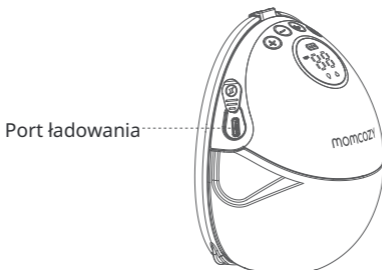

Naładuj baterię w następujący sposób:

- a . Włóż USB końcówkę kabla ładującego do interfejsu USB adaptera zasilania;
- b . Włóż wtyczkę adaptera zasilania do gniazdka AC;
- c . Włóż końcówkę Type-C kabla ładującego do portu ładowania.



Rys. 4 Pozycja portu ładowania

Urządzenie potrzebuje około 150 minut na pełne naładowanie ładowanie.

Wyświetlacz ładowania			
Ładowanie z jednym paskiem baterii: Sekwencja cykli ciągle od lewej do prawej: Pasek 1 - Pasek 2 - Pasek 3	Ładowanie z dwoma paskami baterii: Pasek 1 pozostaje nieprzerwanie podświetlony, przy cyklicznym przechodzeniu między Pasek 2 a Pasek 3	Ładowanie z trzema paskami baterii: Paski 1 i 2 pozostają nieprzerwanie podświetlone, podczas gdy Pasek 3 miga	W pełni naładowana: wszystkie trzy paski pozostają nieprzerwanie podświetlone
			

Odłącz adapter zasilania od gniazdka, odłącz kabel ładujący od adaptera zasilania i jednostki głównej po zakończeniu ładowania.



Ostrzeżenie

Laktator nie może być używany podczas ładowania! Kabel ładujący służy wyłącznie do połączenia między adapterem zasilania a jednostką noszonej pompki do piersi Momcozy w celu ładowania, proszę nie podłączać do innych urządzeń, w przeciwnym razie może to spowodować wypadek porażenia prądem!

- Jeśli obudowa adaptera zasilania staje się luźna, oddzielona lub uszkodzona, natychmiast zaprzestań używania adaptera zasilania i skontaktuj się z producentem adaptera zasilania.
- Jeśli kabel ładujący jest uszkodzony, złamany lub pęknięty, natychmiast zaprzestań używania kabla ładującego i skontaktuj się z producentem w celu wymiany na nowy (zobacz ostatnią stronę tego podręcznika w celu uzyskania informacji kontaktowych).
- Natychmiast przestań używać urządzenia, jeśli zauważysz jakiegokolwiek dymienie lub palenie się jednostki pompki lub adaptera zasilania.



Ostrzeżenie

Używanie niewłaściwego typu adaptera lub zakupienie adaptera niskiej jakości może zmniejszyć bezpieczeństwo urządzenia oraz uszkodzić twoją własność i zdrowie. Proszę zakupić adapter medyczny, który spełnia normy IEC 60601-1 i IEC 60601-1-2 na profesjonalnych rynkach medycznych, upewnić się, że wyjście adaptera zasilania to DC 5V 1A.

Uwagi:

- Po pełnym naładowaniu baterii, jeśli czas pracy baterii jest krótszy niż wcześniej i chcesz ją wymienić, nie próbuj wymieniać akumulatora samodzielnie. Proszę skontaktować się z producentem w celu wymiany. Samodzielne demontaż i wymiana baterii mogą spowodować uszkodzenie jednostki głównej i baterii.
- Gdy produkt nie jest używany przez dłuższy czas, bateria będzie się powoli rozładowywać. Aby uniknąć uszkodzenia baterii z powodu niskiego napięcia przez długi czas, proszę ładować urządzenie co trzy miesiące.

7.2 Czyszczenie i dezynfekcja

7.2.1 Opis ogólny / wymagania

Dostarczanie mleka matki to jedna z najlepszych rzeczy, które możesz zrobić dla zdrowia i rozwoju swojego dziecka. Odciąganie mleka to jeden ze sposobów, aby zapewnić mleko matki swojemu dziecku. Utrzymanie części pompki w czystości jest kluczowe, ponieważ zarazki mogą szybko rozwijać się w mleku matki lub resztkach mleka matki, które pozostają na częściach pompki. Przestrzeganie tych kroków może pomóc zapobiec kontaminacji i chronić Twoje dziecko przed infekcją.

Jeśli Twoje dziecko urodziło się przedwcześnie lub ma inne problemy zdrowotne, lekarze zajmujący się zdrowiem Twojego dziecka mogą mieć dodatkowe zalecenia dotyczące bezpiecznego odciążania mleka matki.

1) PRZED KAŻDYM UŻYCIEM

Sprawdź i zmontuj czysty zestaw pompki.

Wyczyść silnik pompki za pomocą chusteczek dezynfekujących.

2) PO KAŻDYM UŻYCIU

Bezpiecznie przechowuj mleko: użyj toreb do przechowywania mleka matki lub czystych, nadających się do kontaktu z żywnością pojemników do przechowywania odciągniętego mleka matki. Upewnij się, że pojemniki są wykonane ze szkła lub plastiku i mają szczelne pokrywy, a także oznacz je datą i godziną, a następnie natychmiast umieść je w lodówce, zamrażarce lub torbie chłodzącej z wkładami chłodzącymi.

Czysty obszar do odciążania: Wyczyść pokrętła, włącznik zasilania i blat środkiem dezynfekującym.




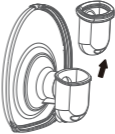
3) Części, które należy czyścić i dezynfekować

Wyczyść i zdezynfekuj wszystkie części, które mają kontakt z piersią i mlekiem matki przed pierwszym użyciem pompki do piersi oraz po każdym użyciu.

- Części mające kontakt z mlekiem: części zestawu do zbierania mleka, w tym Flansa, Membrana, Zawór i Zbieracz mleka.
- Części mające kontakt tylko ze skórą piersi: Flansa.

4) Przed czyszczeniem/dezynfekcją:

- a . Proszę dokładnie umyć ręce mydłem i wodą przez 20 sekund.
- b . Proszę rozmontować wszystkie części w następujący sposób:

 <p>Rys. 5</p>	 <p>Rys. 6</p>
<p>1) . Chwyć wystające części, znajdujące się po obu stronach silnika pompki, a następnie oddziel silnik pompki od zbieracza mleka.</p>	<p>2) . Odłącz flanszę od zbieracza mleka.</p>
 <p>Rys. 7</p>	 <p>Rys. 8</p>
<p>3) . Oddziel zawór od flanszy.</p>	<p>4) . Usuń membranę z flanszy.</p>

Uwaga :

Nigdy nie wkładaj jednostki głównej, kabla ładującego ani adaptera (jeśli zakupiłeś adapter) do wody ani do zmywarki, ponieważ spowoduje to trwałe uszkodzenie tych części.

7.2.2 Czyszczenie i dezynfekcja części kontaktujących się z mlekiem

Krok 1 : Czyszczenie

Proszę ręcznie wyczyścić urządzenie! Bezpieczeństwo używania zmywarki do czyszczenia i dezynfekcji tego produktu nie zostało zweryfikowane.

Ostrzeżenie

Nie używaj środków czyszczących antybakteryjnych ani ściernych do czyszczenia części pompki do piersi, ponieważ może to spowodować uszkodzenie.

1) Przygotuj poniższe przedmioty :

- Mydło i gorącą wodę
- Woda nadająca się do picia
- Czysty zlew używany tylko do przedmiotów do karmienia niemowląt
- Czysta szczotka używana tylko do przedmiotów do karmienia niemowląt.
- Nieużywana ściereczka lub ręcznik papierowy


2) Płukanie : Płucz części zestawu do zbierania mleka i inne przedmioty do karmienia, trzymając je pod bieżącą wodą, aby usunąć pozostałe mleko lub brud. Woda może być ciepła lub zimna, według Twojego uznania.



Rys. 9

3) Mycie części zestawu do zbierania mleka :

- Umieść części zestawu do zbierania mleka w czystym zlewie używanym tylko do przedmiotów do karmienia niemowląt. Nie myj bezpośrednio w zlewie, ponieważ może on zawierać zarazki, które mogą skazić te przedmioty.
- Namocz części zestawu do zbierania mleka w ciepłej wodzie 40-60 °C (104-140 °F) przez 3 ~ 5 minut.

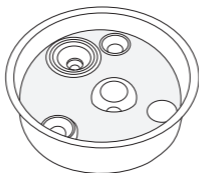


Rys. 10

- Użyj czystej szczotki używanej tylko do przedmiotów do karmienia niemowląt, aby wyszorować przedmioty.

4) Ponowne płukanie : Płucz, trzymając przedmioty pod bieżącą wodą lub zanurzając je w świeżej wodzie w osobnym zlewie, który jest używany tylko do czyszczenia przedmiotów do karmienia niemowląt. Jeśli nadal jest brud, powtórz krok 3 i ponownie wypłucz, aż nie będzie widocznego brudu.

5) Dokładnie osusz powietrzem : Umieść części zestawu do zbierania mleka, zlew i szczotkę do butelek na czystym, nieużywanym ręczniku do naczyń lub ręczniku papierowym w miejscu chronionym przed brudem i kurzem. Nie używaj ręcznika do naczyń do pocierania lub osuszania przedmiotów, ponieważ może to przenieść zarazki na przedmioty!

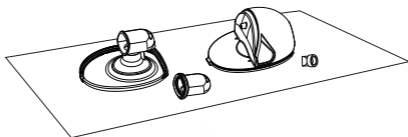

Rys. 11

6) Umyj zlew i szczotkę do butelek : Dokładnie wypłucz zlew i szczotkę i pozwól im wyschnąć na powietrzu po każdym użyciu. Myj je co kilka dni ręcznie z mydłem i ciepłą wodą. Jeśli twoje dziecko ma mniej niż 3 miesiące, urodziło się przedwcześnie lub ma osłabiony układ odpornościowy z powodu choroby (takiej jak HIV) lub leczenia medycznego (takiego jak chemioterapia w przypadku raka), umyj zlew i szczotkę do butelek po każdym użyciu.

Po czyszczeniu:

Aby dodatkowo usunąć zarazki, dezynfekuj części zestawu do zbierania mleka, zlew i szczotkę do butelek przynajmniej raz dziennie po ich umyciu. Przedmioty można dezynfekować za pomocą wrzącej wody z ustawieniem dezynfekcji. Dezynfekcja jest szczególnie ważna, jeśli Twoje dziecko ma mniej niż 3 miesiące, urodziło się przedwcześnie lub ma osłabiony układ odpornościowy z powodu choroby lub leczenia medycznego. Aby dezynfekować części kontaktowe mleka, zapoznaj się z krokiem 2.

Krok 2: Dezynfekcja

Ostrzeżenie: Nie sterylizuj części pompki w mikrofalówce ani w sterylizatorze UV. Wysoka temperatura (> 110 °C) skróci ich żywotność i spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa.

Przed dezynfekcją upewnij się, że masz oczyszczony zestaw do zbierania mleka, szczotki do butelek i zlew, korzystając z powyższych metod. Dezynfekuj wszystkie przedmioty mające kontakt z mlekiem (nawet szczotkę do butelek i zlew!) korzystając z jednej z poniższych metod.

1) Przygotuj poniższe przedmioty:


- Garnek domowy
- Woda nadająca się do picia
- Czyste szczypce



Ostrzeżenie :

Podczas dezynfekcji wrzącą wodą, zapobiegaj dotykaniu butelki lub innych części do boków garnka. Może to spowodować nieodwracalne odkształcenie lub uszkodzenie produktu.

2) Umieść rozłożony zestaw do zbierania mleka w garnku i napełnij garnek wystarczającą ilością wody, aby przykryć komponenty do dezynfekcji. Pozwól wodzie wrzeć przez 3 minuty, upewniając się, że części nie dotykają boków garnka.

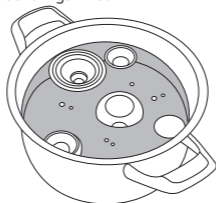


Rys. 12

3) Usuń przedmioty za pomocą czystych szczypiec.



Rys. 13

4) Dokładnie osusz na powietrzu.

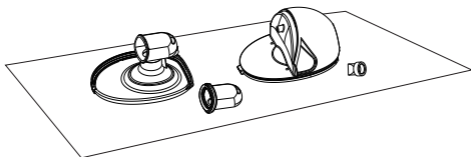

Rys. 14

Krok 3 : Przechowuj bezpiecznie

Przechowuj suche przedmioty w bezpiecznym miejscu, aż będą potrzebne. Upewnij się, że czyste części pompki, szczotki do butelek i zlewy są dokładnie osuszone na powietrzu przed przechowywaniem. Przedmioty muszą być całkowicie suche, aby pomóc zapobiec rozwojowi zarazków i pleśni. Przechowuj suche przedmioty w czystym, chronionym miejscu, aby zapobiec zanieczyszczeniu.

1. Myj ręce : Dokładnie umyj ręce mydłem i wodą.
2. Złóż ponownie: Złóż czyste, suche części pompki.
3. Przechowuj bezpiecznie: Umieść złożone części pompki i inne akcesoria do karmienia, przedmioty, zlew oraz suchą szczotkę do butelek w czystym, chronionym miejscu, takim jak zamknięta szafka kuchenne, która jest używana tylko do przechowywania czystych naczyń.

7.2.3 Czyszczenie / Dezynfekcja innych części

Powłokę jednostki głównej należy czyścić i dezynfekować po raz pierwszy oraz po każdym użyciu. Inne części, które nie mają kontaktu z ciałem ludzkim ani mlekiem podczas odciągania, należy czyścić tylko wtedy, gdy są brudne.

Czyszczenie / dezynfekcja przedmiotów w temperaturze pokojowej 5 ° C ~ 40 ° C jak poniżej:

Przygotuj poniższe przedmioty:

- Dezynfekcja
- 70% chusteczki nasączone izopropanolem
- Czysta, miękka szmatka

Metoda czyszczenia:

1. Przed przystąpieniem do tej procedury czyszczenia, najpierw umyj ręce środkiem dezynfekującym.
2. Usuń wszelkie pozostałości obcych substancji z jednostki głównej i / lub kabla ładującego za pomocą czystej, miękkiej szmatki.

3. Weź kawałek chusteczki nasączonej 70 % izopropanolem i przetrzyj części, aż nie pozostaną widoczne zanieczyszczenia.
4. Osusz urządzenie, umieszczając je w temperaturze pokojowej na 10 minut, aby odparować pozostałości roztworu czyszczącego.

Metoda dezynfekcji:

Wyczyść obudowę jednostki głównej według powyższej metody przed dezynfekcją.

1. Zdezynfekuj obudowę jednostki głównej za pomocą miękkiej szmatki nasączonej 70 % izopropanolem przez 3 minuty.
2. Osusz ją, umieszczając jednostkę główną w temperaturze pokojowej na 10 minut, aby odparować pozostałości roztworu dezynfekującego.

7.3 Instrukcja użytkowania

7.3.1 Przygotowanie przed użyciem



Ostrzeżenie

1. Umyj ręce mydłem i wodą, a następnie sprawdź i zmontuj czysty zestaw do odciągania.
2. Czas trwania sesji odciągania:

Produkt ten jest zasilany akumulatorem litowo-jonowym, po pełnym naładowaniu może być używany przez 5-6 sesji (około 180 minut) odciągania, 30 minut na sesję. Typowa sesja odciągania trwa około 10-5 minut na każdą pierś, ale powinieneś tylko odciągać tak długo, jak jest to komfortowe i efektywne dla Ciebie.

1. Wybierz rozmiar flanszy

Noszona pompka do piersi Momcozy jest dostarczana z flanszą 24 mm oraz wkładkami do flanszy 17 / 19 / 21 mm. Jeśli dostarczona flansza i wkładka do flanszy nie są odpowiednie, możesz zakupić różne rozmiary flanszy i wkładek do flanszy na Amazonie lub na oficjalnej stronie Momcozy. Wpisz "momcozy" w pasku wyszukiwania i znajdź rozmiar flanszy oraz wkładkę do flanszy, która pasuje do Ciebie.



Rys.15 wybierz odpowiedni rozmiar

2. Stymuluj sutek

a) Stymuluj swój sutek, aby uzyskać pełny rozmiar (nie pomijaj tego kroku!). b) Umieść sutek w najmniejszym otworze, który możesz wygodnie włożyć bez forsowania.

c) Wybierz otwór, który może wygodnie pomieścić bardzo podstawę twojego sutka.

d) Zmierz się na podstawie tabeli rozmiarów.

3. Przetestuj dopasowanie flanszy

A. Aby znaleźć odpowiedni rozmiar flanszy, najpierw musisz upewnić się, że umieszczasz flanszę w odpowiednim miejscu na swoim biuście.

B. Proszę przycisnąć flanszę do piersi, aż nie będzie szczeliny. Upewnij się, że twój sutek znajduje się dokładnie w środku flanszy.



Rys.16



Rys.17

Za mały

Za mała: Podczas odciągania, jeśli twój sutek nadal ociera się o wewnętrzną ścianę flanszy, to ta flansza jest dla ciebie za mała.


Dobre dopasowanie

Odpowiednie dopasowanie: Podczas odciągania, jeśli twój sutek porusza się gładko bez ocierania lub dotykania wewnętrznej ściany flanszy, a prawie żaden areola nie jest wciągana do środka, to ta flansza jest dla ciebie odpowiednia.

Za duży



Za duża: Podczas odciągania, jeśli duża część areoli jest wciągana do środka, to ta flansza jest dla ciebie za duża.

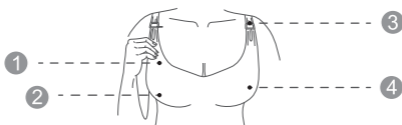4. Wybierz odpowiedni biustonosz



Rys.18

- 1 Wykonany z elastycznego materiału
- 2 Bez drutów i wyściółki
- 3 Ma kłapkę
- 4 Pełne pokrycie

 <p>Rys.19</p>	 <p>Rys.20</p>
<p>BRAK SZPAR Kiedy wkładasz pompkę do swojego biustonosza, silikonowa flansa tej pompki powinna być mocno przylegająca do twojej skóry bez szczeliny.</p>	<p>JEŚLI SIĘ PORUSZA Jeśli czujesz, że pompka się porusza podczas użytkowania, proszę dociągnąć ramiączko biustonosza, aby ponownie dostosować pompkę lub wybrać inny biustonosz.</p>

5. Zalecana Postawa

 **Uwaga :**

Zawsze siedź lub stój prosto podczas odciągania, aby zapobiec wyciekaniu mleka. Ta pompka nie powinna być używana w pozycji leżącej lub podczas snu, aby zapewnić prawidłową orientację podczas użytkowania.

POSTAWA

Upewnij się, że pompka i zbieracz mleka zawsze pozostają w pionowej pozycji. W przeciwnym razie mleko może się wylać.



Rys.21 prawidłowa postawa

7.3.2 Montaż Pompki



Ostrzeżenie:

Upewnij się, że części pompki do piersi, które mają kontakt z mlekiem lub piersią, zostały dokładnie wyczyszczone i zdezynfekowane.






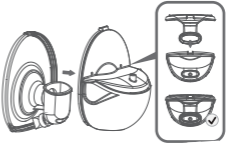
Ostrzeżenie

- Bądź ostrożny, gdy dezynfekujesz części pompki do piersi przez ich gotowanie, mogą być bardzo gorące. Aby zapobiec poparzeniom, rozpocznij montaż pompki do piersi dopiero po ostudzeniu zdezynfekowanych części.
- Dokładnie umyj ręce mydłem i wodą przed dotknięciem części pompki do piersi i piersi, aby zapobiec zanieczyszczeniu. Unikaj dotykania wnętrza zestawu do zbierania mleka.

Uwagi:

- Prawidłowe umiejscowienie flanszy, membrany, zbieracza mleka, zaworu itp. jest niezbędne, aby pompka do piersi mogła wytworzyć odpowiednie podciśnienie.
- Przed każdym użyciem wizualnie sprawdź poszczególne elementy pod kątem pęknięć, odprysków, łez, odbarwień lub pogorszenia stanu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia urządzenia, prosimy o zaprzestanie używania do czasu wymiany części.

Dokładnie umyj ręce mydłem i wodą, a następnie zmontuj pompkę w następujący sposób:

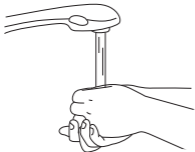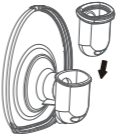 <p>Rys. 22</p>	 <p>Rys. 23</p>
<p>1. Dokładnie umyj ręce mydłem i wodą.</p>	<p>2. Przymocuj membranę do flanszy i zastosuj lekką presję wokół krawędzi, aż membrana dobrze uszczelni się.</p>
 <p>Rys. 24</p>	 <p>Rys. 25</p>
<p>3. Delikatnie wciśnij zawór do flanszy. Upewnij się, że nie ma szczelin.</p>	<p>4. Jak pokazano na zdjęciu, wyrównaj flanszę ze zbieraczem mleka, najpierw wyrównując górny wylot mleka, a następnie nacisnij a krawędź flanszy dłonią, aby zapewnić pewne dopasowanie.</p>



Rys. 26

Pompka do piersi jest teraz gotowa do użycia.

7.3.3 Instrukcje dotyczące odciągania



Ostrzeżenie:

- Zanim usuniesz korpus laktatora z piersi, zawsze wyłącz pompkę do piersi, aby uwolnić podciśnienie.
- Nie kontynuuj odciągania przez więcej niż 5 minut, jeśli nie udało Ci się odciągnąć mleka. Spróbuj odciągnąć w innym czasie w ciągu dnia.
- Jeśli proces staje się bardzo niewygodny lub bolesny, przestań używać pompki i skonsultuj się z lekarzem.




Ostrzeżenie:

- Monitorowanie poziomu mleka podczas odciągania, aby upewnić się, że nie dojdzie do przepełnienia.

1. Wyrównanie

a . Przed odciąganiem upewnij się, że pompka jest mocno przyciśnięta do piersi bez szczeliny (Rys. 27).

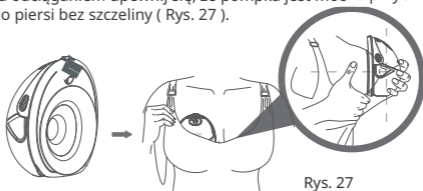


Rys. 27


b. Aby wyrównać, przytrzymaj flanszę przy piersi, aby zobaczyć, czy Twój sutek jest wyśrodkowany w tunelu flanszy. Możesz potrzebować pochylić się w przód.

c. Po ustawieniu, spójrz przez flanszę, aby potwierdzić, że twój sutek jest wyśrodkowany przed odciąganiem. Czubek twojego sutka NIE powinien dotykać górnej, bocznych ani dolnej części tunelu flanszy. Jeśli tak jest, spróbuj ponownie.

Pierwsza Perspektywa

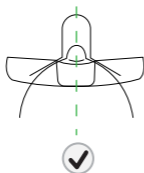

Poprawne Ustawienie
Ekspresja Mleka

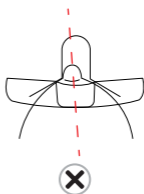

Niepoprawne Ustawienie
Spróbuj ponownie

Rys. 28

Uwaga:

Poprawne ustawienie sutka jest kluczowe dla komfortu, ekspresji i wydajności.

Sutek musi być prawidłowo umiejscowiony w tunelu flanszy przed odciąganiem, aby uniknąć dyskomfortu.

Zobacz Rozdział 7.3.1 Przygotowanie przed użyciem - Wybór rozmiaru flanszy.

2. Zabezpiecz Laktator w Biustonoszu

Zabezpiecz pompę na miejscu w biustonoszu, dbając o to, aby pompa była mocno przyciśnięta do piersi. W razie potrzeby, zaciśnij biustonosz, aby utrzymać pompę na miejscu i rozpocznij odciąganie.



Rys. 29

3. Rozpocznij Odciąganie

Nie wsuwaj pompy bezpośrednio do biustonosza, postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku.

Odłącz ładowarkę przed użyciem.

A. Włącz pompę

Skonsultuj się z lekarzem, aby zrozumieć, jak długo powinienęś odciągać mleko. Pompka Momcozy wyłącza się automatycznie po 30 minutach odciągania.

Długie naciśnięcie przycisku Włącz / Wyłącz / Pauza w celu włączenia lub wyłączenia pompki.

Krótkie naciśnięcie przycisku Włącz / Wyłącz / Pauza w celu wstrzymania, a następnie naciśnij dowolny przycisk, aby kontynuować sesję odciągania.

- Domyślnym trybem jest tryb stymulacji, gdy po raz pierwszy używasz pompki.
- Domyślny poziom podciśnienia to poziom 1 (w tym czasie wskaźnik poziomu ssania LED wyświetla 1 jako poziom 1).

B. Wybierz tryb

Tryby: Tryb Stymulacji & Tryb Wyrażania & Tryb Mieszany

Gdy po raz pierwszy używasz pompki, domyślne ustawienie to poziom ssania 1 w trybie stymulacji.

C. Wybierz poziom podciśnienia

Pompka Momcozy ma 9 ustawień ciśnienia podciśnienia dla każdego trybu, co daje Ci kontrolę nad tym, co jest komfortowe i działa najefektywniej we wszystkich trybach.

Gdy poczujesz podciśnienie na swoim sutku, użyj przycisku Zwiększ / Zmniejsz, aby dostosować podciśnienie i znaleźć preferowane ustawienie we wszystkich trybach. Wyświetlacz LED wyłączy się po 60 sekundach braku aktywności, naciśnięcie dowolnego przycisku ponownie aktywuje wyświetlacz LED.

Wskazówka: Wyższe podciśnienie nie zawsze oznacza większą ilość mleka. Nadmierne obciążenie sutka może zmniejszyć produkcję mleka. Zawsze upewnij się, że odciążasz w komfortowym poziomie. Jeśli nie czujesz ssania, sprawdź, czy pompka jest poprawnie złożona.



Ostrzeżenie

- * Pompka Momcozy nie obsługuje użycia podczas ładowania. Zawsze odłącz od ładowarki i zamknij pokrywkę ładowania przed użyciem.
- * Pompka Momcozy nie powinna być używana w pozycji leżącej, podczas intensywnych aktywności ani podczas wykonywania czynności z ryzykiem obrażeń.
- * Używanie pompki do piersi nie powinno powodować bólu. Nie próbuj odciągać z ustawieniem podciśnienia, które jest zbyt wysokie lub niewygodne. Jeśli podczas odciągania odczuwasz nadmierny dyskomfort lub ból, przerwij odciąganie, zerwij uszczelnienie wokół sutka i zakończ sesję.

4. Wstrzymaj / Rozpocznij odciąganie

Aby wstrzymać odciąganie, krótko naciśnij przycisk Włącz / Wyłącz / Pauza, a wskaźnik trybu zacznie migać. Naciśnij dowolny przycisk, aby kontynuować dotychczasową sesję odciągania.

5. Wyłącz Pompę

Długie naciśnięcie przycisku Włącz / Wyłącz / Pauza wyłączy pompkę. Dodatkowo produkt automatycznie wyłączy się po 30 minutach odciągania.

Uwaga: Wstrzymanie / rozpoczęcie odciągania, wybór trybu i poziomu podciśnienia nie zresetuje czasu odciągania.

6. Usuń Pompę

Użyj palca, aby zerwać uszczelnienie między flanszą a tkanką piersiową.

Pochyl się lekko do przodu, aby usunąć pompkę z piersi po zakończeniu sesji odciągania, a następnie trzymaj otwór flanszy do góry, aby zapobiec wylaniu mleka.



Rys. 30

Zalecamy, aby użytkownik zakończył sesję odciągania, gdy objętość odciągniętego mleka w zbieraczu mleka zbliża się do 120 ml, aby uniknąć przepełnienia.

7. Wlewanie mleka

Uwaga: Nie otwieraj flanszy bezpośrednio, aby wlać mleko, ponieważ może to spowodować, że mleko dostanie się do jednostki głównej i spowoduje uszkodzenie! Proszę najpierw wyłączyć pompkę do piersi, zdjąć jednostkę główną i wlać mleko matki z wylotu mleka na górze zbieracza mleka. Po zakończeniu zbierania mleka, proszę wlać świeżo wyciśnięte mleko do innych zbieraczy mleka z zakrętkami lub woreczków do przechowywania mleka w odpowiednim czasie. Dokładnie zakręć zakrętkę na innym zbieraczu mleka i przechowuj mleko.



Rys. 31



Ostrzeżenie

- Zbieracze mleka dostarczone są do zbierania mleka podczas ssania. Jeśli musisz nakarmić dziecko lub przechować wyciśnięte mleko matki, proszę użyć innego zbieracza mleka z zakrętką.



Ostrzeżenie

- Natychmiast schłódź lub zamroź wyciśnięte mleko lub przechowuj je w temperaturze 16 °C ~ 25 °C przez 2-4 godziny przed nakarmieniem dziecka.

7.4 Przechowywanie mleka matki

7.4.1 Prawidłowe przechowywanie mleka matki

Stosowanie zalecanych technik przechowywania i przygotowania może utrzymać bezpieczeństwo i jakość wyrażonego mleka matki dla zdrowia dziecka.

To są ogólne wytyczne dotyczące przechowywania mleka ludzkiego w różnych temperaturach. Różne czynniki wpływają na to, jak długo mleko ludzkie może być przechowywane bezpiecznie. Takie czynniki obejmują objętość mleka, temperaturę otoczenia w momencie wyrażania mleka, wahania temperatury w lodówce i zamrażarce oraz czystość otoczenia.

Przechowywanie mleka matki po wyrażeniu:

- Schłódź lub schładzaj mleko zaraz po jego wyrażeniu, jeśli to możliwe. Możesz umieścić je w lodówce, włożyć do torby chłodzącej lub izolowanej torby chłodzącej, lub zamrozić w małych (2 do 4 uncji) porcjach na późniejsze karmienia.
- Używaj toreb do przechowywania mleka matki lub czystych, nadających się do kontaktu z żywnością pojemników do przechowywania wyrażonego mleka matki. Upewnij się, że pojemniki są wykonane ze szkła lub plastiku i mają szczelne pokrywki.
 - Unikaj butelek z symbolem recyklingu numer 7, który wskazuje, że pojemnik może być wykonany z plastiku zawierającego BPA.
- Usuń powietrze przed zamknięciem.
- Układaj torby płasko do zamrożenia. Aby zapobiec sklepaniu się toreb, proszę oddzielić torby ręcznikami papierowymi.
- Nigdy nie przechowuj mleka matki w jednorazowych wkładkach do butelek ani w plastikowych torbach, które nie są przeznaczone do przechowywania mleka matki.
- Delikatnie zamieszaj pojemnik, aby wymieszać część kremową mleka matki, która może unosić się na wierzchu, z resztą mleka. Nie wstrząsaj mlekiem. Może to spowodować rozkład niektórych cennych składników mleka.
- Świeżo wyciśnięte lub odciągnięte mleko można przechowywać:

Rodzaj mleka matki	Miejsca i temperatury przechowywania		
	Błat 77 ° F (25 ° C) lub chłodniej (temperatura pokojowa)	Lodówka 40 ° F (4 ° C)	Zamrażarka 23 ° F (-5 ° C) lub chłodniej
Świeżo wyciśnięte lub odciągnięte	W ciągu 2-4 godzin	W ciągu 24 godzin	W ciągu 3 miesięcy
Rozmrożone, wcześniej zamrożone	Użyj w ciągu 2 godzin po zakończeniu karmienia przez dziecko		

Te wytyczne dotyczą zdrowych, donoszonych dzieci i mogą się różnić w przypadku wcześniaków lub chorych dzieci. Skonsultuj się z lekarzem.

Wskazówki dotyczące przechowywania:

- Wyraźnie oznacz pojemnik do przechowywania datą, kiedy mleko zostało odciągnięte, dołącz imię dziecka, jeśli przekazujesz mleko do opieki nad dzieckiem.
- Nie przechowuj mleka matki w drzwiach lodówki ani zamrażarki.

Pomoże to chronić mleko matki przed zmianami temperatury spowodowanymi otwieraniem i zamykaniem drzwi.

- Jeśli nie sądzisz, że wykorzystasz świeżo odciągnięte mleko matki w ciągu 4 dni, zamroź je od razu. Pomoże to chronić jakość mleka matki.
- Podczas mrożenia mleka matki:
 - Przechowuj małe ilości, aby uniknąć marnowania mleka, które może nie być dokończony. Przechowuj w pojemnikach o pojemności 2 do 4 uncji lub w ilości oferowanej podczas jednego karmienia.
 - Zostaw około jednego cala wolnej przestrzeni na górze pojemnika, ponieważ mleko matki rozszerza się podczas mrożenia.
 - Mleko matki można przechowywać w izolowanej torbie chłodzącej z zamrożonymi wkładami na lód przez maksymalnie 24 godziny podczas podróży. W miejscu docelowym użyj mleka od razu, przechowuj je w lodówce lub zamroź.

7.4.2 Bezpieczne rozmrażanie mleka matki Zawsze rozmrażaj najstarsze

- mleko matki jako pierwsze. Pamiętaj, że najpierw wchodzi, najpierw wychodzi. Z biegiem czasu jakość mleka matki może się pogarszać.
- Istnieje kilka sposobów na rozmrożenie mleka matki:
 - W lodówce przez noc.
 - Umieść w pojemniku z ciepłą lub letnią wodą.
 - Pod letnią bieżącą wodą.
 - Nigdy nie rozmrażaj ani nie podgrzewaj mleka matki w mikrofalówce. Mikrofalowanie może zniszczyć składniki odżywcze w mleku matki i stworzyć gorące miejsca, które mogą poparzyć usta dziecka.
 - Jeśli rozmrażasz mleko matki w lodówce, użyj go w ciągu 24 godzin. Zaczynaj liczyć 24 godziny, gdy mleko matki całkowicie się rozmrozi, a nie od momentu, gdy wyjęłeś je z zamrażarki.
 - Gdy mleko matki osiągnie temperaturę pokojową lub zostanie podgrzane, użyj go w ciągu 2 godzin.
- Nigdy nie zamrażaj ponownie mleka matki po jego rozmrożeniu.

8. Transfer

Podczas podróży prosimy używać dostarczonego kabla ładującego i do-
stosować go do odpowiedniego źródła zasilania w danej lokalizacji.

Przed wejściem na pokład samolotu prosimy skonsultować się z linią
lotniczą w sprawie przewozu lub używania tego laktatora na pokładzie.

Temperatura: -20 do 60 °C / -4 do 140 °F

Wilgotność względna: 15% - 90%

Ciśnienie atmosferyczne: 70 - 106 kPa

9. Warunki przechowywania

Jak przechowywać Laktator

* Krótkoterminowe przechowywanie

* Proszę trzymać pompkę do piersi z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Przechowuj pompkę do piersi i jej akcesoria w bezpiecznym, czystym i suchym miejscu, z dala od dzieci.

* Długoterminowe przechowywanie

Po pierwsze, proszę naładować pompkę przed długoterminowym przechowywaniem, aby wydłużyć jej żywotność. Po drugie, przechowuj ją w miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego, aby uniknąć odbarwienia.

Po trzecie, przed przechowywaniem umyj i osusz części nadające się do mycia.

* Temperatura: -20 do 60 °C / -4 do 140 °F

* Wilgotność względna: 15% - 90%

* Ciśnienie atmosferyczne: 70 do 106 kPa

* Zazwyczaj 30 minut jest wymagane, aby ogrzać się z minimalnej temperatury przechowywania i/lub schłodzić z maksymalnej temperatury przechowywania, aż będzie gotowa do pracy.

10. Specyfikacja

Numer modelu.	BP311
Nazwa	Noszona pompka do piersi
Moc wymagania	Wejście: 100-240Vac, 50/60Hz; Wyjście: 5V $\overline{=}$ 1A (Ładowanie przez dostarczony USB 2.0 / Typ-C kabel ładujący i zakupiony samodzielnie adapter zasilania)
Napięcie wejściowe	5V $\overline{=}$ 1A
Zasilanie	Akumulator litowo-jonowy 3.7V / 1350mAh
Moc znamionowa	5W
Tryby ssania:	tryb stymulacji, tryb wyrażania i tryb mieszany
Zakres podciśnienia (± 5 mmHg)	Tryb stymulacji: -75mmHg ~ -145mmHg Tryb wyrażania: -120mmHg ~ -295mmHg Tryb mieszany: -75mmHg ~ -295mmHg

Prędkość cyklu (± 2 cykle / min)	Prędkość cyklu Tryb stymulacji: 70 ~ 88 cykli / min Tryb wyrażania: 27 ~ 60 cykli / min Tryb mieszany: 56-82 cykli / min
Wymiary pompki	130mm X 114mm X 73mm
Waga (ze wszystkimi akcesoriami)	287g
Czas użytkowania produktu	500 godzin
Poziom hałasu	≤50dB
Rodzaj ochrony przed porażeniem elektrycznym	Sprzęt zasilany wewnętrznie.
Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym	Typ BF część stosowana (zestaw do zbierania mleka)
Warunki eksploatacji	Temperatura : 0 ° C do 40 ° C ; Wilgotność : 15 % do 90% Ciśnienie atmosferyczne : 70 kPa do 106 kPa
Środowisko transportu i przechowywania	Temperatura : -20 ° C do 60 ° C ; Wilgotność: 15 % do 90 %, Ciśnienie atmosferyczne: 70 kPa do 106 kPa
Czas ładowania baterii	150 minut
Czas użytkowania baterii	180 minutes

11. Konserwacja i części zamienne

Urządzenie nie zawiera części, które można serwisować przez użytkownika: Otwarcie lub manipulacja tym urządzeniem unieważni gwarancję. W przypadku, gdy urządzenie wymaga naprawy, powinno być zwrócone do firmy zajmującej się sprzętem medycznym lub bezpośrednio do sprzedawcy.

Modyfikacja jakiegokolwiek rodzaju jest zabroniona.

PRODUCENT udostępni na żądanie schematy obwodów, listy części, opisy, instrukcje kalibracji lub inne informacje, które pomogą PERSONELU SERWISOWEMU naprawić te części urządzenia, które PRODUCENT wyznaczył jako nadające się do naprawy przez PERSONEL SERWISOWY. Gdy produkt nie jest używany przez dłuższy czas, bateria będzie się powoli rozładowywać. Aby uniknąć uszkodzenia baterii z powodu niskiego napięcia przez długi czas, proszę ładować urządzenie co trzy miesiące.



Ostrzeżenie

Ostrzeżenie: wymiana baterii litowych przez niewykwalifikowany personel może stanowić zagrożenie.

Nie czyść ani nie konserwuj urządzenia, gdy jest w użyciu lub podczas ładowania.

12. Deklaracja zgodności

Shenzhen Root Innovation Technology Co., Ltd. deklaruje, że urządzenie spełnia następujące normy IEC60601-1, IEC60601-1-2, IEC60601-1-11, IEC62304, ISO10993-5, ISO10993-10, ISO10993-1, ISO 14971, ISO10993-23.

13. Rozwiązywanie problemów

Problemy	Rozwiązania
Pompka działa nie	<ul style="list-style-type: none">• Jeśli odruch wypływu nie wystąpił jeszcze, rozważ pozostawienie pompki na piersi przez dłuższy czas, aby zaobserwować możliwe opóźnione wystąpienie odruchu wypływu. Uwaga: Czas początkowego wypływu mleka jest unikalny dla każdej osoby i różni się w zależności od wielu czynników.- Sprawdź ustawienie sutka, wstrzymaj pompkę i usuń ją z piersi. Ponownie ustaw pompkę zgodnie z opisem poniżej.• Możesz nie mieć odpowiedniego rozmiaru Flanszy. (Zobacz Rozdział 7.3 Instrukcje użytkownika - Wybór Flanszy. Rozmiar).
Mleko nie płynie (Alignment)	<ul style="list-style-type: none">• Wstrzymaj pompkę i usuń ją z piersi. Ponownie ustaw ją prawidłowo. (Zobacz Rozdział 7.3 Instrukcje użytkownika -- Możesz również oddzielić pompkę od flanszy, aby ponownie ustawić. Następnie umieść swój sutek w tunelu flanszy i przynieś pompkę do swojej piersi (Zobacz Rozdział 7.3 Instrukcje użytkownika - Ustawienie).
Potrzebujesz z ponownie ustawić.	<ul style="list-style-type: none">• Wstrzymaj pompkę i usuń ją z piersi. Ponownie ustaw ją prawidłowo. (Zobacz Rozdział 7.3 Instrukcje użytkownika - Ustawienie).• Możesz również oddzielić Pompkę od Flanszy, aby ponownie ustawić. Następnie umieść swój sutek w tunelu flanszy i przynieś pompkę do swojej piersi (Zobacz Rozdział 7.3. Instrukcje użytkownika - Ustawienie).

<p>Czujesz dyskomfort podczas odciągania</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jeśli odczuwasz nadmierny dyskomfort, wypróbuj następujące (zobacz Rozdział 7.3 Instrukcja użytkownika - Wyrównanie): • Upewnij się, że mocno przyciskasz laktator Momcozy do piersi podczas fazy stymulacji. • Zaciśnij biustonosz, aby upewnić się, że pompka Momcozy jest mocno przytrzymywana przy piersi. • Zmniejsz siłę ssania. • Ponownie ustaw pompkę Momcozy. • Możesz odciągać zbyt długo. Pompka Momcozy wyłącza się automatycznie po 30 minutach. • Możesz nie mieć odpowiedniego rozmiaru flanszy (zobacz Rozdział 7.3 Instrukcja użytkownika - Wybór rozmiaru flanszy). Zatrzymaj się i skonsultuj z lekarzem lub specjalistą ds. karmienia piersią.
<p>Zmniejszone (niskie) ciśnienie pompki</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pompka ma 9 ustawień ssania. Naciśnij przycisk zwiększania, aby zwiększyć siłę ssania. • Sprawdź stan swoich części nadających się do mycia. Powinny być wymieniane po trzech miesiącach użytkowania. • Jeśli to nie pomoże, spróbuj następujących kroków: 1. <p>Sprawdź połączenia między wszystkimi częściami nadającymi się do mycia, aby upewnić się, że są dobrze zabezpieczone.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Wizualnie sprawdź wszystkie części nadające się do mycia i wymień je, jeśli są uszkodzone. 3. Sprawdź, czy zasilanie jest włączone. 4. Naciśnij Pompę mocno na pierś.
<p>Zatrzymaj odciąganie</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pompka automatycznie przestaje odciągać po 30 minutach. • Krótkie naciśnięcie przycisku Włącz / Wyłącz / Pauza wstrzyma pompę, naciśnij ponownie, aby wznowić.
<p>Pompka nie przestaje odciągać</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Naciśnij przycisk Włącz / Wyłącz / Pauza. • Jeśli problem nadal występuje, przerwij uszczelnienie, wkładając palec między tkanę piersiową a flanszę. Następnie naciśnij przycisk Włącz / Wyłącz / Pauza, aby wyłączyć pompkę.
<p>Pompka lub ładowarka powinna mokry (zanurzone w wodzie).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Natychmiast osusz pompkę. Ustaw Pompę w pozycji pionowej. być umieszczona z portem ładowania w dół i kontrolkami ssania w górę, i pozostaw ją do wyschnięcia na noc. Nie używaj pompki ani ładowarki w ciągu 24 godzin . • Skontaktuj się z Obsługą Klienta .
<p>Pompka nie ładowała się.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Upewnij się, że kabel USB typu C z standardową ładowarką (nie dołączoną) jest w pełni podłączony do portu ładowania pompki .

Uwaga: Jeśli powyższe metody nadal nie rozwiązują problemu, skontaktuj się z producentem, zobacz ostatnią stronę w celu uzyskania informacji kontaktowych.

14. Utylizacja

Na koniec cyklu życia produktu, nie wyrzucaj tego produktu do normalnych odpadów domowych, ale przynieś go do punktu zbiórki do recyklingu sprzętu elektronicznego i baterii . Odpady elektryczne i elektroniczne mogą mieć potencjalnie szkodliwy wpływ na środowisko. Nieprawidłowa dyspozycja może prowadzić do gromadzenia się szkodliwych toksyn w tle, wodzie i glebie, co jest szkodliwe dla zdrowia ludzkiego . masz obowiązek prawidłowo zutylizować urządzenie . Skonsultuj się z lokalnym urzędem w celu uzyskania informacji na temat utylizacji.

15. Gwarancja

Proszę skontaktować się z producentem w przypadku roszczenia w ramach gwarancji, informacje kontaktowe znajdują się na ostatniej stronie tego podręcznika użytkownika. Jeśli musisz wysłać urządzenie, dołącz kopię paragonu z wyraźnym opisem wady.

Warunki gwarancji są następujące:

1. Okres gwarancji na urządzenie wynosi jeden rok od daty zakupu . W przypadku roszczenia gwarancyjnego, datę zakupu należy udowodnić za pomocą paragonu lub faktury.
2. Naprawy w ramach gwarancji nie wydłużają okresu gwarancji ani dla urządzenia, ani dla części zamiennych.
3. Następujące przypadki są wyłączone z gwarancji:
 - Wszystkie uszkodzenia, które powstały w wyniku niewłaściwego użytkowania, np. nieprzestrzegania instrukcji obsługi.
 - Wszystkie uszkodzenia, które powstały w wyniku napraw lub modyfikacji przez klienta lub nieautoryzowane osoby trzecie.
 - Uszkodzenia, które powstały podczas transportu od producenta do konsumenta lub podczas transportu do centrum serwisowego.
 - Akcesoria, które podlegają normalnemu zużyciu.
 - Uszkodzenie urządzenia spowodowane samodzielnym demontażem urządzeń.
 - Odpowiedzialność za bezpośrednie lub pośrednie straty wynikowe spowodowane przez jednostkę jest wyłączona, nawet jeśli uszkodzenie jednostki jest uznawane za roszczenie gwarancyjne.

16. Informacje EMC

Sprzęt o następującej ISTOTNEJ WYDAJNOŚCI jest przeznaczony do użytku w środowisku opieki zdrowotnej w domu.

Istotna wydajność:

Funkcja Urządzenia	Kryteria przejścia / nieprzejścia Specyficzne dla urządzenia	Metoda Wykrywania/ Testowania
Siła podciśnienia (±5mmHg)	Poziomy ssania (stymulacja): -75mmHg do -145mmHg Poziomy ssania (ekspresja): -120mmHg do -295mmHg Poziomy ssania (mieszanka): -75mmHg do -295mmHg	Obserwacja manometru podciśnienia
Prędkość cyklu (+ 2cykle / min)	Poziomy ssania (stymulacja): 70-88 Poziomy ssania (Ekspresja) : 27-60 Poziomy ssania (Mieszanka) : 56-82.	Obserwacja
Maksymalne podciśnienie	≤-300mmHg	Obserwacja manometru podciśnienia
Oprogramowanie do regulacji ciśnienia ssania	-300mmHg	Obserwacja manometru podciśnienia
Cofanie mechanizmie zapobiegawczym	Brak wycieków przy maksymalnym podciśnienie	Obserwacja

Jeśli wydajność podstawowa zostanie utracona lub obniżona z powodu zakłóceń elektromagnetycznych, może to prowadzić do utraty funkcji produktu lub obrażeń pacjentów, proszę przeczytać poniższe ważne informacje, aby uniknąć możliwych zakłóceń elektromagnetycznych.



Ostrzeżenie

Używanie telefonu komórkowego lub kuchenki mikrofalowej, sprzętu chirurgicznego HF, obrazowania rezonansu magnetycznego lub innego sprzętu emitującego fale radiowe w pobliżu tego produktu może spowodować awarię.

- Należy unikać używania tego sprzętu w pobliżu lub w stosie z innym sprzętem, ponieważ może to prowadzić do niewłaściwego działania. Jeśli takie użycie jest konieczne, należy obserwować ten sprzęt i inny sprzęt, aby upewnić się, że działają normalnie.
- Przenośny sprzęt komunikacji RF (w tym akcesoria takie jak kable antenowe i zewnętrzne anteny) powinien być używany nie bliżej niż 30 cm (12 cali) od jakiegokolwiek części noszonej pompki do piersi Momcozy, w tym kabli określonych przez producenta. W przeciwnym razie może dojść do degradacji wydajności tego urządzenia.
- Użycie akcesoriów, przetworników i kabli innych niż te określone lub dostarczone przez producenta tego urządzenia może prowadzić do zwiększonej emisji elektromagnetycznej lub zmniejszonej odporności elektromagnetycznej tego urządzenia i skutkować niewłaściwym działaniem.



Ostrzeżenie:

- 1) Urządzenia zabezpieczające, przeciwdziałające kradzieży i identyfikacji radiowej (RFID). Niektóre elektromagnetyczne systemy przeciwdziałania kradzieży oraz wykrywacze metali, takie jak te używane przy wejściach lub wyjściach z domów towarowych, bibliotek i innych miejsc publicznych, a także urządzenia do kontroli bezpieczeństwa na lotniskach, mogą wpływać na noszoną pompkę do piersi Momcozy. Proszę nie używać noszonej pompki do piersi Momcozy w pobliżu tych miejsc. Dodatkowo, urządzenia RFID, które często są używane do odczytu identyfikatorów, a także niektóre urządzenia do dezaktywacji tagów, takie jak te używane przy kasach w sklepach i przy wypożyczaniu w bibliotekach, mogą również wpływać na noszoną pompkę do piersi Momcozy. Proszę nie używać noszonej pompki do piersi Momcozy w pobliżu tych miejsc. Jeśli musisz przejść obok jednego z tych urządzeń, wyłącz swoją noszoną pompkę do piersi Momcozy. Przed każdym użyciem sprawdź status swojej noszonej pompki do piersi Momcozy, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- 2) Używanie diatermii krótkofalowej, diatermii mikrofalowej lub diatermii ultradźwiękowej (wszystkie określane jako diatermia) oraz urządzeń elektrokautearyjnych w pobliżu tego produktu może spowodować awarię lub utratę wydajności, proszę nie używać noszonej pompki do piersi Momcozy w pobliżu tego sprzętu.

Lista kabli i maksymalna długość kabli jest następująca:

Nazwa kabla	Długość kabla	Czy ekranowany
Kabel ładujący	800±10mm	Nie

Wytyczne i deklaracja producenta - emisja elektromagnetyczna		
Noszona pompka do piersi Momczy jest przeznaczona do użytku w określonym poniżej środowisku elektromagnetycznym. Użytkownik noszonej pompki do piersi Momczy powinien zapewnić, że jest ona używana w odpowiednim środowisku.		
Test emisji	Zgodność	Środowisko elektromagnetyczne - wskazówki
Emisje RF przewodzone i promieniowane CISPR 11	Grupa 1 Klasa B	Noszona pompka do piersi Momczy wykorzystuje energię RF tylko do swoich wewnętrznych funkcji. Dlatego jej emisje RF są bardzo niskie i prawdopodobnie nie spowodują zakłóceń w pobliskim sprzęcie elektronicznym.
Emisje RF prowadzone i promieniowane CISPR 11	Grupa 1 Klasa B	Noszona pompka do piersi Momczy nadaje się do użytku we wszystkich obiektach, w tym w domowych oraz tych bezpośrednio podłączonych do publicznej sieci zasilania niskiego napięcia, która zasilą budynki wykorzystywane do celów domowych, z wyjątkiem miejsc w pobliżu aktywnego sprzętu chirurgicznego HF oraz w pomieszczeniach osłoniętych przed RF dla obrazowania rezonansu magnetycznego.
Emisje harmoniczne IEC 61000-3-2	Klasa A	
Wahania napięcia / emisje migotania IEC 61000-3-3	Zgodne	

Wytyczne i Deklaracja Producenta - Odporność Elektromagnetyczna			
Noszona pompka do piersi Momczy jest przeznaczona do użytku w określonym poniżej środowisku elektromagnetycznym. Klient lub użytkownik noszonej pompki do piersi Momczy powinien zapewnić, że jest ona używana w odpowiednim środowisku.			
Test Odporności	IEC 60601-1-2 Poziom testu	Poziom zgodności	Środowisko elektromagnetyczne - wskazówki
Wylądowanie elektrostatyczne IEC 61000-4-2	$\pm 8kV$ kontakt ; $\pm 2kV$, $\pm 4kV$, $\pm 8kV$, $\pm 15 kV$ air	$\pm 8kV$ kontakt ; $\pm 2kV$, $\pm 4kV$, $\pm 8kV$, $\pm 15kV$ powietrze	Podłogi powinny być drewniane, betonowe lub z ceramiki. Jeśli podłogi są pokryte syntetycznym materiałem, to wilgotność względna powinna wynosić co najmniej 30 %.

Promieniowane pola elektromagnetyczne RF IEC 61000-4-3	10V / m (Środowisko opieki zdrowotnej w domu), 80MHz - 2.7 GHz 80% AM przy 1kHz	10V / m (Środowisko opieki zdrowotnej w domu), 80MHz - 2.7 GHz 80% AM przy 1kHz	
Szybkie transjenty elektryczne / impulsy IEC 61000-4-4	+2kV linie zasilające AC; ±1kV linie DC / sygnałowe. Częstotliwość powtórzeń 100 kHz	+ 2kV AC zasilanie linie;	jakość energii powinna być taka jak w ŚRODOWISKU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DOMU.
Przebiegięcia IEC 61000-4-5	±0,5kV, ±1kV linie do linii; ± 0,5kV , ±1kV, ±2kV linie do ziemi	±0,5kV, ±1kV linie do linii;	jakość energii powinna być taka jak w ŚRODOWISKU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DOMU.
Zakłócenia prowadzone wywołane przez pola RF IEC 61000-4-6	3V 0,15 MHz - 80 MHz, 6V w pasmach ISM pomiędzy 0.15MHz a 80MHz 80% AM przy 1 kHz	3V 0,15 MHz - 80 MHz, 6V w pasmach ISM i pasmach amatorskich od 0.15MHz do 80MHz 80% AM przy 1 kHz	jakość energii powinna być taka jak w ŚRODOWISKU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DOMU.
<p>Uwaga : Pasma ISM (przemysłowe, naukowe i medyczne) między 0,15 MHz a 80 MHz to 6,765 MHz do 6,795 MHz ; 13,553 MHz do 13,567 MHz ; 26,957 MHz do 27,283 MHz ; oraz 40,66 MHz do 40,70 MHz . Pasma radiowe amatorskie między 0,15 MHz a 80 MHz to 1,8 MHz do 2,0 MHz , 3,5 MHz do 4,0 MHz , 5,3 MHz do 5,4 MHz , 7 MHz do 7,3 MHz , 10,1 MHz do 10,15 MHz , 14 MHz do 14,2 MHz , 18,07 MHz do 18,17 MHz , 21,0 MHz do 21,4 MHz , 24,89 MHz do 24,99 MHz , 28,0 MHz do 29,7 MHz i 50,0 MHz do 54,0 MHz .</p>			
Moc znamionowa częstotliwość pola magnetyczne IEC 61000-4-8	30A/m 50Hz lub 60Hz	30A/m 50Hz lub 60Hz	Pola magnetyczne o częstotliwości zasilania powinny być na poziomach charakterystycznych dla ŚRODOWISKA OPIEKI ZDROWOTNEJ W DOMU.
Spadki napięcia IEC 61000-4-11	0% UT, 0,5 cyklu Przy 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° i 315°; 0 % UT, 1 cykl oraz 70% UT, 25/30 cyklu Jednofazowe : przy 0°	Zastosowanie	Jakość zasilania powinna być na poziomie środowiska opieki zdrowotnej w domu.
Przerwy w zasilaniu IEC 61000-4-11	0 % UT , 250/300 cykl	Zastosowanie	

UWAGA : UT to napięcie sieciowe a.c. przed zastosowaniem poziomu testowego.
Np. : 25/30 oznacza 25 okresów przy 50 Hz lub 30 okresów przy 60 Hz.

Wytyczne i deklaracja producenta - odporność elektromagnetyczna

Noszona pompka do piersi Momczy jest przeznaczona do użytku w określonym poniżej środowisku elektromagnetycznym. Klient lub użytkownik noszonej pompki do piersi Momczy powinien zapewnić, że jest ona używana w takim środowisku.

Test odporności	Poziom testowy IEC 60601-1-2	Poziom zgodności	Środowisko elektromagnetyczne - wskazówki
Pola zbliżeniowe pochodzące od urządzeń łączności bezprzewodowej RF IEC 61000-4-3	Sprawdź następną tabelę	Zgodne	
Zbliżeniowe pola magnetyczne IEC 61000-4-39	Sprawdź następną tabelę	Zgodne	

Specyfikacje testów dla **ODPORNOŚCI PORTU OBUDOWY** na sprzęt komunikacji bezprzewodowej RF

Częstotliwość testu (MHz)	Pasma a) (MHz)	Usługa a)	Modulacja	Poziom Testu Odporności (V/m)
385	380 – 390	TETRA 400	Modulacja pulsu b) 18 Hz	27
450	430 – 470	GMRS 460, FRS 460	FM c) ± 5 kHz dewiacja 1 kHz sinus	28
710	704 – 787	Pasma LTE 13 , 17	Modulacja impulsowa b) 217 Hz	9
745				
780				
810	800 – 960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, Pasma LTE 5	Modulacja impulsowa b) 18 Hz	28
870				
930				

1720	1700 – 1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE Band 1, 3, 4, 25; UMTS	Modulacja impulsowa b) 217 Hz	28
1845				
1970				
2450	2400 – 2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Band	Modulacja impulsowa b) 217 Hz	28
5240	5100 – 5800	WLAN 802.11 a/n	Modulacja impulsowa b) 217 Hz	9
5500				
5785				

UWAGA Jeśli konieczne jest osiągnięcie POZIOMU TESTU ODPORNOŚCI, odległość między anteną nadawczą a MEEQUIPMENT lub ME SYSTEM może zostać zmniejszona do 1 m. Dystans testowy 1 m jest dozwolony zgodnie z IEC 61000-4-3.

a) Dla niektórych usług uwzględnione są tylko częstotliwości uplink. b) Nośna powinna być modulowana sygnałem prostokątnym o cyklu pracy 50%. c) Alternatywnie do modulacji FM, nośna może być modulowana impulsowo przy użyciu sygnału prostokątnego o cyklu pracy 50% przy 18 Hz. Chociaż nie reprezentuje to rzeczywistej modulacji, byłoby to najgorszym przypadkiem.

Specyfikacje testów dla odporności portu obudowy na pola magnetyczne w pobliżu

Częstotliwość testowa	Modulacja	Poziom testu odporności (A/M)
30 kHz ^{a)}	CW	8
134.2 kHz	Modulacja impulsowa b) 2.1 kHz	65 ^{c)}
13.56 MHz	Modulacja impulsowa b) 50 kHz	7.5 ^{c)}

a) Test ten dotyczy wyłącznie URZĄDZEŃ ME i SYSTEMÓW ME przeznaczonych do użytku w domowym środowisku opieki zdrowotnej.
b) Nośna powinna być modulowana sygnałem prostokątnym cyklu pracy 50%.
c) r.m.s , przed zastosowaniem modulacji .

17. Oświadczenie o podróżach lub użyciu międzynarodowym

Ponieważ wydajność noszonej pompki do piersi Momcozy może być wpływana przez otoczenie zewnętrzne, w związku z niepewnością i niestabilnością środowiska podróży, prosimy nie używać urządzenia podczas podróży ani na pokładzie samolotu.

Noszona pompka do piersi Momcozy może być używana międzynarodowo, ale musi być używana i przechowywana w środowisku określonym w tym podręczniku użytkownika, a także prosimy upewnić się, że zasilacz ma napięcie wejściowe AC 100 ~ 240V 50/60 Hz i napięcie wyjściowe DC 5V 1A, oraz prosimy upewnić się, że posiadasz konwerter do przekształcenia na odpowiednie napięcie w docelowym kraju. Aby zapewnić, że noszona pompka do piersi Momcozy nie będzie miała problemów podczas przenoszenia, prosimy sprawdzić następujące elementy przed użyciem, aby upewnić się, że może działać normalnie:

- Sprawdź noszoną pompkę do piersi Momcozy, aby upewnić się, że jest wolna od uszkodzeń, a przed każdym użyciem sprawdź stan swojej noszonej pompki do piersi Momcozy, aby upewnić się, że może działać.

Jeśli wystąpi jakakolwiek nieprawidłowość, proszę zaprzestać używania urządzenia.

18. Informacje o producencie



Shenzhen Root Innovation Technology Co.,Ltd.

2-201, Piętro 2, Budynek Komputerowy Hasee, Nr 2 Beier Rd,
Ulica Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong, Chiny,
518129

E-mail: support@momcozy.com

W przypadku potrzeby pomocy w konfiguracji, użytkowaniu lub konserwacji urządzenia, lub w celu zgłoszenia nieoczekiwanych działań lub zdarzeń, prosimy o kontakt z nami.

19. Oświadczenie o zgodności z FCC

Jakiegokolwiek zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

WAŻNA UWAGA :

Uwaga : To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Te limity mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej. To urządzenie generuje, używa i może emitować energię radiową, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić, włączając i wyłączając urządzenie.

użytkownik jest zachęcany do próby skorygowania zakłóceń poprzez jedno lub więcej z następujących działań:

- Przeorientowanie lub przeniesienie anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się z dealerem lub doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

20.Zgłaszanie niepożądanych zdarzeń

MedWatch jest programem Agencji Żywności i Leków (FDA) do zgłaszania poważnych reakcji, problemów z jakością produktów, terapeutycznej niejednoznaczności / niepowodzenia oraz błędów w użyciu produktów medycznych dla ludzi, w tym leków, produktów biologicznych, urządzeń medycznych, suplementów diety, mleka dla niemowląt i kosmetyków.

Jeśli uważasz, że ty lub ktoś z twojej rodziny doświadczył poważnej reakcji na produkt medyczny.

Zaleca się, abyś zabrał formularz zgłoszeniowy do swojego lekarza. Twój dostawca usług zdrowotnych może dostarczyć informacje kliniczne na podstawie twojej historii medycznej, które mogą pomóc FDA ewaluować twoje zgłoszenie.

Jednak rozumiemy, że z różnych powodów możesz nie chcieć, aby formularz został wypełniony przez twojego dostawcę usług zdrowotnych, lub twój dostawca usług zdrowotnych może zdecydować się nie wypełniać formularza.

Twój dostawca

opieki zdrowotnej NIE jest zobowiązany do zgłaszania do FDA. W takich sytuacjach możesz samodzielnie wypełnić formularz zgłoszeniowy online.

Otrzymasz potwierdzenie od FDA, gdy Twoje zgłoszenie zostanie odebrane.

Raporty są przeglądane przez pracowników FDA. Skontaktujemy się z Tobą osobiście tylko wtedy, gdy będziemy potrzebować dodatkowych informacji.

Zgłaszanie raportów o zdarzeniach niepożądanych do FDA. Użyj jednej z poniższych metod? aby zgłosić dobrowolne raporty o zdarzeniach niepożądanych do FDA:

1) Zgłoszenie

Online? pod adresem: www.accessdata.fda.gov/scripts/medwatch/index.cfm?acton=reporting.
home

2) Formularz zgłoszeniowy dla konsumentów FDA 3500B. Postępuj zgodnie z instrukcjami na formularzu, aby przesłać go faksem lub pocztą. Aby uzyskać pomoc w wypełnieniu formularza, zobacz? MedWatch Learn. Formularz jest dostępny pod adresem: www.fda.gov/downloads/aboutFDA/reportsmanualsforms/forms/ucm349464.pdf

3) Zadzwoń do FDA pod numer 1-800-FDA-1088? aby zgłosić przez telefon

4) Formularz zgłoszeniowy FDA 3500? powszechnie używany przez profesjonalistów zdrowotnych. Formularz jest dostępny pod adresem: www.fda.gov/downloads/aboutFDA/reportmanualsforms/forms/ucm163919.pdf

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.

Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Przedstawiciel

Nazwa firmy: Lutejiacheng Maternal and Child Products GmbH

Adres firmy: Betriebsstätte c/o Sonnenberg Services GmbH Sternstraße 6740479 Düsseldorf

E-mail: support@momcozy.com